

**Caractéristiques/fonctions du produit :**

1. Le protecteur des articulations des cuisses et des hanches du chien est en néoprène, qui est délicat, doux et élastique
2. La gaine de soutien des jambes a un effet antichoc et peut être portée après une blessure ou une intervention chirurgicale pour prévenir efficacement les blessures secondaires lorsque le chien est blessé.
3. Soulage la douleur des blessures aux ligaments croisés, de l'arthrose et des problèmes de rotule
4. Aide à traiter la perte de stabilité causée par l'arthrite.
5. Convient aux petits, moyens et grands chiens à pattes courtes.

utiliser:

1. Idéal pour envelopper les blessures aux jambes. Il suffit d'envelopper la plaie et de l'envelopper avec notre bandage de jambe de chien pour éviter une infection secondaire de la plaie causée par le chien léchant ou touchant l'eau.
2. Votre chien peut subir des blessures secondaires dues à une blessure au genou, ce qui nécessite un protège-jambes pour chien.
3. Fournir un soutien et une stabilité maximum. Aide à : Arthrite stable après une blessure de fatigue Prend en charge toute tension postopératoire
4. Faites attention à retirer la gaine 2 à 3 fois par jour, laissez les jambes respirer la nuit

PRODUCT INFORMATION

# 产品信息

感受舒适新体验

品名

腕关节辅助矫正带 (PD60176)

材质

聚酯纤维

产品颜色

黑色

产品尺码

S-M-L



排斥上下樓梯




行進間突然坐下




橫坐




低頭不情願的步行

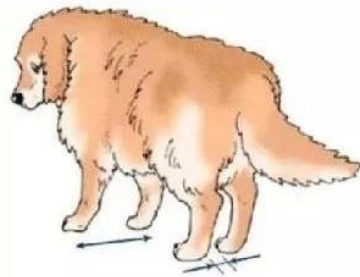

後肢跟前肢比起來間距狹小，步幅也狹小

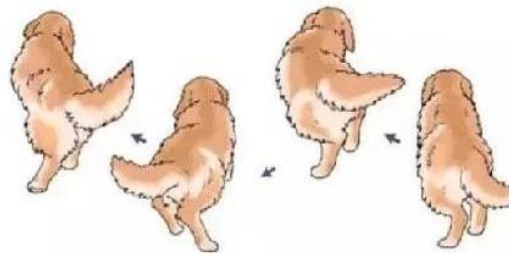

走路時腰部左右大幅度搖擺，後肢步幅窄小，不太往前推進

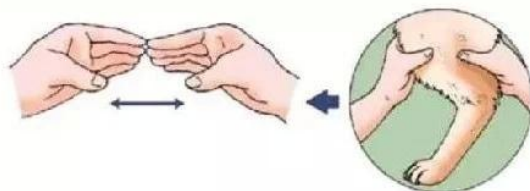

用雙手測量腿圍

髻關節形成不全的那一邊會比較細小

# 产品尺码表

\*请在大腿中间位置水平测量腿围



Size	腰围	腿围
S	25-46cm/9.8"-18.1"	7-11cm/2.8-4.3"
M	38-68cm/15"-26.8"	10-15cm/3.9"-5.9"
L	58-89cm/22.8"-35"	16-25cm/6.3"-9.8"

温馨提示：手工测量可能存在1-3cm误差，敬请谅解。

# 容易患上髌关节发育不良的犬种



正常  
髌关节



中度  
髌关节发育不良



严重  
髌关节发育不良



圣伯纳犬 (47%)



罗威纳犬 (20%)



金毛寻回犬 (20%)



牧羊犬 (19%)

巴哥犬、斗牛犬等犬种患上的也不在少数



## 腿部可调节绑带

微弹紧致的腿部绑带调节（可拆卸）

...

## 高强度织带

可以有更多的调节活动空间

...





PRODUCT DETAILS

# 细节展示

匠心设计 为宠而生



## 插扣固定

方便穿戴，牢固稳定，可调节腰围




## 双层透气网布腰带

微弹网布，舒适不勒，大孔网眼，透气不闷



# 髋关节发育不良有哪些表现

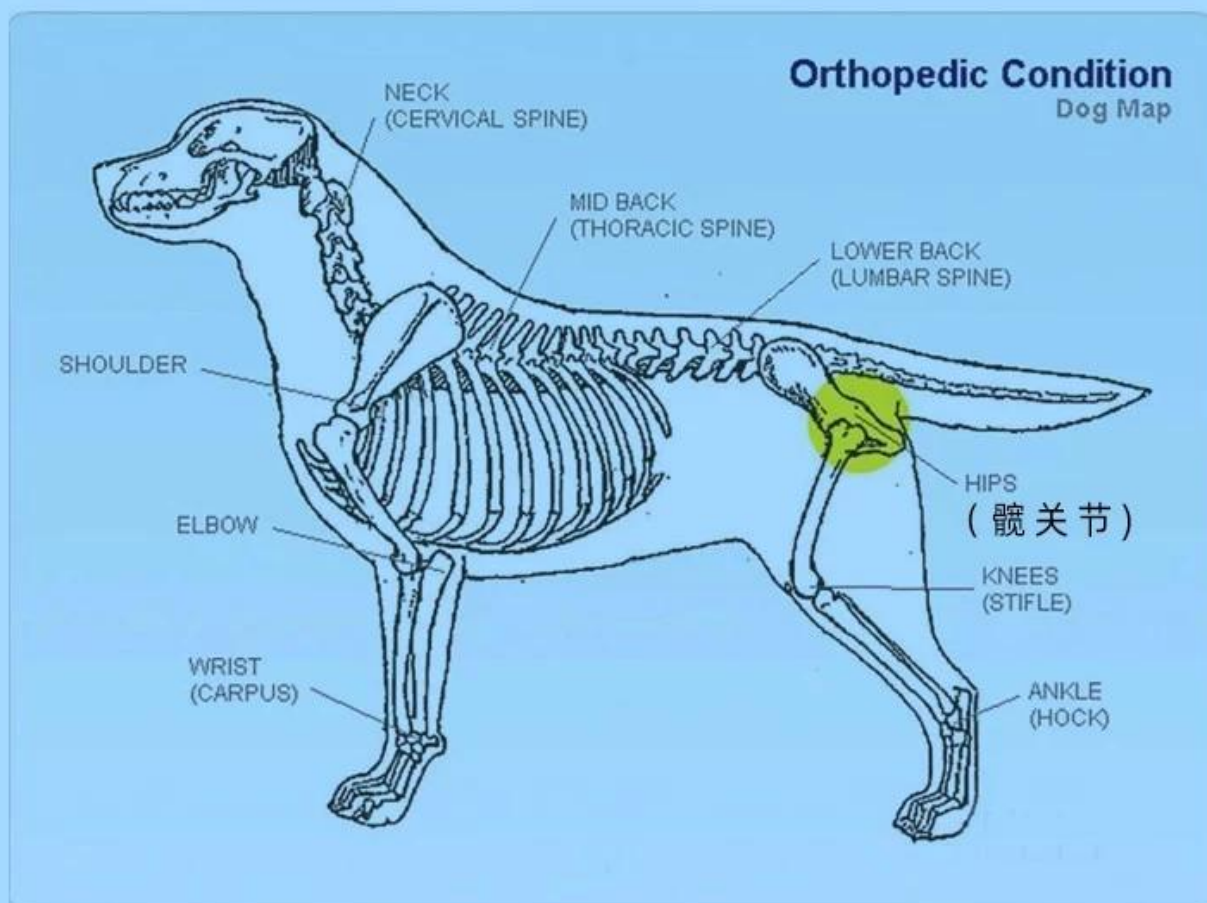


1. 狗狗不喜欢运动，喜欢趴下或者卧下。  
尤其对于上下楼梯特别抗拒。
2. 狗狗想要站立时，会出现身体发抖，吃力疼痛的状况。
3. 狗狗走路时扭屁股情况非常严重，走路不是很协调。
4. 狗狗走路的动作以及跑起来的动作会有异常，经常会成三角跳或者兔子跳。
5. 对狗狗的关节进行检查时会有剧烈的疼痛，狗狗会发出叫声。



# 髌关节辅助矫正带

为髌关节发育不良的狗狗设计的辅助型恢复产品  
起到一定预防和改善髌关节发育不良问题  
还适用于髌关节发育不良发病后的辅助治疗阶段  
调节运动幅度，减轻运动对髌关节造成的疼痛  
对重症需要手术治疗矫正的狗狗  
术后恢复也有一定的保护作用

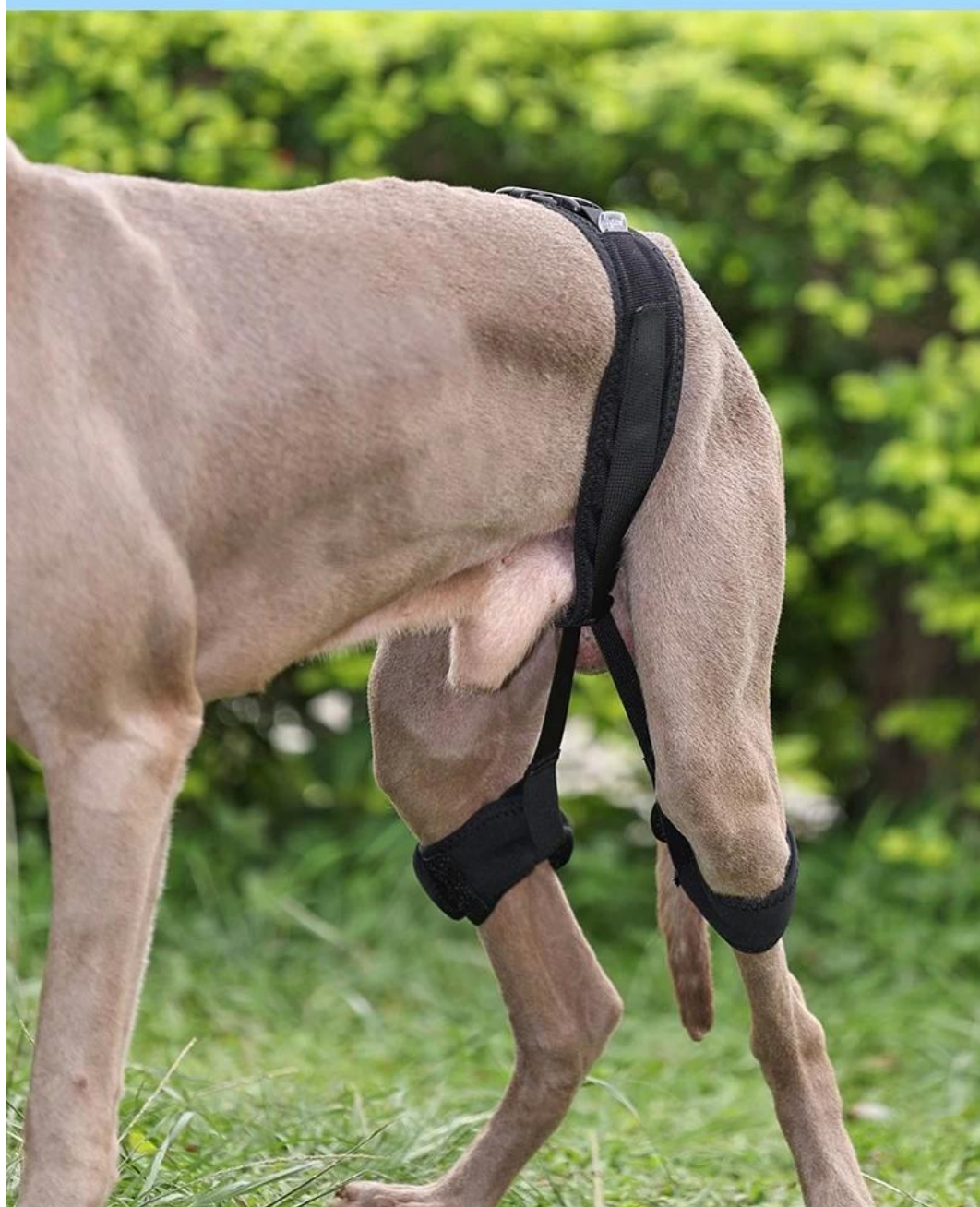



## 使用髌关节带加以辅助和矫正

髌关节辅助矫正带，设计有三处可调节装置（腰带，小腿围固定带，活动范围调节带），能贴合更多狗狗的体型。能更好的贴合狗狗的腿部，不易掉落；采用高品质高强度的尼龙织带，采用滑轮原理，改变力的方向，从而使腰带分摊部分作用于髌关节的压力，调节带末端设计有强力橡筋。



